

# Babyplan® Fertility Gel

SE

Fertilitetsgel



Version WEB  
19022024

Babyplan Fertilitetsgel är ett icke-klibbigt, spermavänligt glidmedel som gör det möjligt för spermier att effektivt förflytta sig till det målinriktade området för att maximera dina chanser att bli gravid. Förbättrar spermiernas rörlighet och skapar rätt miljö för spermiernas överlevnad. Används vid samlag under den fertila perioden av ägglossningscykeln för att främja befruktning.

### **Avsedd användning:**

Babyplan Fertilitetsgel hjälper kroppens egna naturliga vätskor genom att minska friktionen och öka spermierörligheten. Det är säkert att använda för par som försöker bli gravida. Babyplan Fertilitetsgel kan användas före samlag för att ge fukt och smörjning.

### **Bruksanvisning:**

Ta bort säkerhetsförseglingen under locket innan första användningen. Använd en generös mängd på könsorganen, och använd mer så ofta som krävs för att upprätthålla en tillräckligt lubricerande effekt.

### **Biverkningar:**

Det finns inga kända biverkningar. Vid irritation eller allergisk reaktion ska användningen avbrytas omedelbart.

### **Varning:**

Babyplan Fertilitetsgel skadar inte spermier. Det är inte ett preventivmedel. Förvara utom räckhåll för barn. Opbevares vid 5 - 30°C. Undvik ögonkontakt.

### **Innehåll:**

Vatten, Hydroxietylcellulosa, Phenoxyethanol, Etylhexylglycerin, Natrimklorid, Glycerin, Kaliumklorid, Natriumdivätefosfat, Magnesiumklorid, Kalciumklorid.

## Förklaring av symboler på förpackningen:

	Förvaringstemperatur		Försiktighet
	Använd inte om förpackningen är skadad		Läs bruksanvisningen
	Förvaras torrt		Batchkod
	Tillverkare		Icke-sterila
	Medicinsk utrustning		Skyddas mot solljus
	Referensnummer		Återanvänd inte
	Utgångsdatum (månad/år)		Tillverkningsdatum (månad/år)

 60mlgynoseed

  
2292



Turkuaz Sağlık Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal  
Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:45/5

34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

Tel : +90 212 428 68 48

E-mail: [info@turkuazsaglik.com.tr](mailto:info@turkuazsaglik.com.tr)

[www.turkuazsaglik.com.tr](http://www.turkuazsaglik.com.tr)



Filial av E-Invasion A/S

Stålkulegatan 2 E

SE-212 28 Malmö

E-mail: [info@babyplan.com](mailto:info@babyplan.com)



**Babyplan<sup>®</sup>**

When big dreams come true it's often the little things that make the big difference. Let Babyplan help you increase your chances of getting pregnant.

**Babyplan.com**