

Fertilitetsgel

För kvinnor som försöker bli gravida

8 x 5ml

- Tillåter spermier att röra sig effektivt till målområdet
- Maximerar dina chanser för att bli gravid
- Fri från parabener

GynoSEED är ett icke-klibbigt, spermievänligt smörjmedel, som tillåter spermier att röra sig på ett effektivt sätt till målområdet, för att maximera dina chanser för att bli gravid. Förbättrar spermiers rörlighet och skapar den rätta miljön för spermiers överlevnad. För användning i den fertila perioden av ägglossningscykeln för att främja befruktning.

Avsedd användning:

GynoSEED Fertilitetsgel hjälper kroppens egna naturliga vätskor genom att minska friktion och öka spermiers rörlighet. Det är säkert att använda för kvinnor som försöker bli gravida. GynoSEED Fertilitetsgel kan tillföras vaginan för att ge fukt och smörjning.

Användning:

GynoSEED Fertilitetsgel tillförs vaginans insida före samlag. Förpackningen bortskaffas enligt lokala föreskrifter för återvinning.

Biverkningar:

Det finns inga kända biverkningar. I tillfälle av irritation eller allergisk reaktion bör man omedelbart sluta användningen.

Varning:

GynoSEED Fertilitetsgel skadar inte spermier. Det är inte ett preventivmedel.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvaras vid 5–30°C

Undvik kontakt med ögonen.

Innehåll:

Vatten, hydroxyetylcellulosa, fenoxietanol, ethylhexylglycerin, natriumklorid, glycerin, potassiumklorid, sodiumdihydrogenfosfat, magnesiumklorid, calciumklorid.



1. Bryt av toppen på en pipett från förpackningen genom att böja den smala delen sidlänges.



2. Placera tippen av pipetten inne i vaginan så som visas på bilden, och tryck försiktigt på nedre delen av pipetten.