

AVSETT ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

Proov Check tidigt graviditetstest är ett in vitro-diagnostiskt, visuellt kvalitativt immunokromatografiskt test avsett för snabb detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin för att möjliggöra tidig upptäckt av graviditet. Urin ska samlas upp i en kopp – testet är inte avsett för användning i urinstrålen. För användning utan recept (OTC).

INNEHÅLL

Varje test innehåller ett snabbtest baserat på lateral-flow-immunokromatografi. Testet rymmer en kombination av antikroppar, inklusive en monoklonal hCG-antikropp som selektivt detekterar förhöjda nivåer av hCG. När testet utförs genom att doppa teststickan i ett urinprov förs provet fram via kapillärkraft och reagerar med det färgade konjugatet. Ett färgat streck bildas i testområdet på membranet när ett positivt prov reagerar med det specifika antikropp-hCG-färgkonjugatet. Avsaknad av ett färgat streck indikerar ett negativt resultat. En kontrollinje visas alltid som en procedurkontroll.

FÖRVARING OCH STABILITET

1. Förvaras vid 2 °C–30 °C i den förseglade påsen fram till utgångsdatumet som anges på etiketten. Om testet förvaras i kylskåp ska det få anta

REFERENSER

1. L. A. Bastian, K. Nanda, V. Hasselblad, and D. L. Simel, Diagnostic Efficiency of Home Pregnancy Test Kits: A Meta-analysis.

BETYDELSE AV SYMBOLER PÅ FÖRPACKNINGEN

- | | |
|---|--|
|  Förvaringstemperatur |  Lotnummer |
|  Endast för in-vitro diagnostik |  Utgångsdatum |
|  Obs! Läs bruksanvisningen för korrekt användning |  Tillverkare |
|  Ej återanvändbar |  Innehåller tillräckligt för 1 test |
|  Auktoriserad representant |  Förvaras torrt |
|  Skyddas från solljus |  Katalognummer |
|  Unik enhets-identifiering |  Importör |

2. rumstemperatur innan det utförs.
2. Öppna påsen först några minuter före testningen.
3. Förvaras skyddat från solljus, fukt och värme. Använd inte testet om påsen är punkterad eller inte korrekt förseglad.
4. FÅR INTE FRYNAS.

KVALITETSKONTROLL

En procedurkontroll ingår i testet. Ett rött streck som visas i kontrollområdet (C) fungerar som intern procedurkontroll. Det bekräftar att reagenserna fungerar korrekt, att tillräcklig provmängd har använts och att proceduren har följts korrekt. Om testet inte visar någon kontroll- eller testlinje i fönstret ska det kasseras. Utför testet på nytt med ett nytt test och följ proceduren noggrant. Om även det andra testet inte visar några linjer, vänligen kontakta oss.

BEGRÄNSNINGAR

1. Du bör inte enbart basera bedömningen av ditt kliniska tillstånd på resultatet från ett graviditetstest.
2. En låg koncentration av hCG vid en mycket tidig graviditet kan ge ett negativt resultat. Samla då in ett nytt urinprov tidigast 48 timmar senare och testa igen.
3. Förhöjda hCG-nivåer kan bero på andra tillstånd än

- graviditet. Därför bör förekomst av hCG i urinprov inte användas för att diagnostisera graviditet förrän dessa tillstånd har uteslutits.
4. Vissa hälsotillstånd, såsom ovariecysta eller graviditet utanför livmodern (ektopisk graviditet), kan ge falska eller oregelbundna resultat.
5. Testet är endast avsett för tidig upptäckt av graviditet.
6. Förhöjda hCG-nivåer har även påvisats hos patienter med gestationell och icke-gestationell trofoblastsjukdom. Vid behov bör dessa tillstånd uteslutas innan graviditetsdiagnos ställs.
7. Onormal graviditet kan inte skiljas från normal graviditet enbart med hjälp av hCG-mätningar.
8. Läkemedel som innehåller hCG (t.ex. Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) kan ge ett falskt positivt resultat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Testerna är endast avsedda för in vitro-diagnostik och utvärtes bruk. Får inte intas.
2. Kassera efter användning. Teststickan får endast användas en gång.
3. Använd inte efter utgångsdatumet.
4. Använd inte om påsen inte är korrekt förseglad.
5. Förvaras oåtkomligt för barn.
6. Läs alla instruktioner noggrant före användning.

Felaktig användning kan leda till ogiltiga resultat.

7. Produkten är inte avsedd som preventivmedel.
8. Det är alltid bäst att rådgöra med läkare innan man försöker bli gravid.
9. Urinprov kan vara smittsamma; se till att hantera dem korrekt och kassera allt använt testmaterial enligt lokala föreskrifter.

PRESTANDAEGENSKAPER

Känslighet: Denna känslighet har bekräftats med hjälp av hCG-standarder i urin. Resultaten visade att testets analytiska känslighet (den lägsta koncentration som ger 100 % positiva resultat) är 25 mIU/mL.

Noggrannhet: En klinisk (OTC) studie genomfördes. Urinprover samlades in från 24 deltagare med kliniskt bekräftad graviditet och 76 deltagare som inte var gravida. Alla 24 prover från gravida kvinnor testade positivt med Proov Check tidigt graviditetstest och visade även positiva resultat med referenstest utförd av medicinsk personal. Alla icke-gravida kvinnor testade negativt med Proov Check tidigt graviditetstest, och medicinsk personal uppnådde också negativa resultat med referenstestet. De också negativa resultat med referenstesten.

proov/
check

Tidigt
Graviditetstest

Graviditetstest för hemmabruk – för tidig påvisning av hCG

Bruksanvisning

1. Så här tar du ett Proov hCG-test
2. Så här avläser du dina resultat
3. Vad betyder ditt resultat?



När stora drömmar ska gå i uppfyllelse, är det ofta de små sakerna som gör skillnad. Låt Babyplan hjälpa dig med att öka dina möjligheter för att bli gravid

Babyplan.se


Version 1.0
SE 26042025

Proov Check tidigt graviditetstest

ENDAST FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISKT BRUK

Vad är hCG och vad berättar det för mig?

När du är gravid producerar din kropp ett hormon som kallas hCG (humant koriogonadotropin). Tidiga graviditetstester bygger i regel på detektion eller mätning av hCG. Hormonet finns i urinen kort efter befruktning och implantation och fortsätter därefter att stiga.

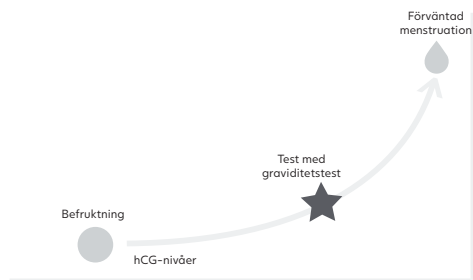

OBSERVERA

Läs all information i bipacksedeln innan du utför testet.

MEDFÖLJANDE MATERIAL:

1. Teststicka
2. Bruksanvisning

MATERIAL SOM KRÄVS MEN INTE INGÅR:

1. Klocka eller timer
2. Behållare för uppsamling av urinprov
3. Latexhandskar

1. Så här tar du ett Proov Tidigt Graviditetstest

OBS: Du kan ta ett Proov Check-test med vilket urinprov som helst, men morgonurin är bäst eftersom den har den högsta koncentrationen av hCG.

1: KISSA

Samla upp ditt urinprov i en ren och torr kopp.

OBS: Spara provet tills du har använt teststickan och avläst resultatet. Då kan du enkelt testa igen med samma prov om det skulle uppstå ett fel.


2: DOPPA

Ta ut teststickan ur folieförpackningen och använd den så snart som möjligt. Doppa stickan upp till MAX-pilarna och håll den där tills du ser urinen börja vandra uppåt (vanligen cirka 10 sekunder).

3: VÄNTA

Lägg stickan på en plan, icke-absorberande yta och låt den utvecklas i 5–10 minuter. Använd gärna en timer.

Om du avläser testet före 5 minuter eller efter 10 minuter kan resultatet bli felaktigt.

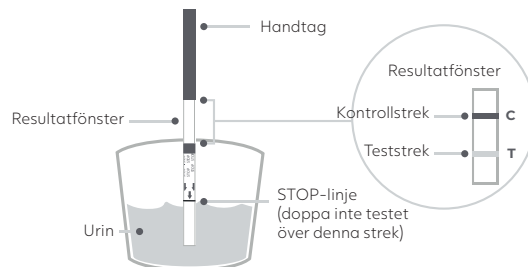

2. Så här avläser du resultatet



POSITIV

Om två tydliga röda linjer visas på testet – oavsett hur svag den ena är – är testet positivt, vilket innebär att hCG finns närvarande. Den ena linjen ska ligga i kontrollområdet (C) och den andra i testområdet (T).



NEGATIV

Om endast en linje visas i kontrollområdet (C) är resultatet negativt.



OGILTIG

Om det vid något tillfälle under testproceduren inte visas någon linje alls, eller om endast testlinjen syns, har testet inte fungerat korrekt. Kontakta oss i så fall.



Ta ett foto 5–10 minuter efter att du har doppat stickan. Då kan du alltid se ditt resultat igen. Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna: proov@babyplan.com

3. Vad betyder ditt resultat?

Positiva resultat

Ett positivt resultat med Proov Check tidigt graviditetstest innebär med största sannolikhet att du är gravid. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare för att bekräfta graviditeten och diskutera nästa steg. Om du är osäker på resultatet bör du testa igen tidigast 48 timmar efter det första testet. Den andra linjen blir mörkare i takt med att hCG-nivån stiger efter implantation.

Negativa resultat

Ett negativt resultat med Proov Check tidigt graviditetstest kan betyda att du inte är gravid, att hCG-nivån ännu inte är tillräckligt hög för att detekteras eller att du kan ha räknat fel på datumet för din förväntade eller uteblivna menstruation. Om du är osäker på resultatet eller fortfarande misstänker graviditet bör du testa igen tidigast 48 timmar efter det första testet. Om du är gravid blir den andra linjen mörkare i takt med att hCG-nivån stiger efter implantation. Om testet fortfarande är negativt efter en utebliven menstruation bör du kontakta din läkare.

Frågor & svar

1. Hur tidigt efter att jag misstänker en graviditet kan jag testa?

Du kan testa din urin redan från den första dag då din menstruation uteblir. Testet kan göras när som helst på dygnet, men morgonurin innehåller den högsta koncentrationen av graviditetshormonet om du är gravid.

2. Måste jag testa med morgonurin?

Även om du kan testa vid vilken tidpunkt som helst på dagen är morgonurin vanligtvis mest koncentrerad och innehåller därför mest hCG.

3. Vilka faktorer kan påverka testresultatet?

Läkemedel som innehåller hCG (t.ex. Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) kan ge ett falskt positivt resultat. Alkohol, p-piller, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonbehandlingar som inte innehåller hCG bör däremot inte påverka resultatet.

4. Betyder ett positivt resultat något annat än en normal graviditet?

Ja, vissa medicinska tillstånd eller läkemedel kan också ge ett positivt resultat. Kontakta därför alltid din läkare vid ett positivt graviditetstest.

5. Hur vet jag att testet har utförts korrekt?

Att en röd linje syns i kontrollfönstret (C) visar att du har följt testproceduren korrekt och att rätt mängd urin har absorberats.

6. Vad ska jag göra om resultatet visar att jag inte är gravid?

hCG-koncentrationen varierar mycket i tidig graviditet. Om du inte får din menstruation inom en vecka efter det förväntade datumet bör du upprepa testet med en ny sticka. Om resultatet fortfarande är negativt och menses uteblir, kontakta din läkare.